

## Exempel på bra och dåliga blodfläckar vid provtagningen

- Fyll alla fyra cirklar på filterpappersdelen på remissen. Droppa blodet mitt i cirkeln från remissens baksida och låt det diffundera ut mot kanterna tills ringen är helt fylld. Om provtagningen avbryts innan cirkeln är fylld måste man fortsätta med nästa cirkel.
- Vid provtagningen ska alla ringar på provpappret fyllas helt med blod.
- Blodet måste tränga igenom filterpapperet helt.

